

## Instructions for use

Single Patient Subdermal Corkscrew

Инструкции за ползване  
Návod k použití  
Brugsanvisning  
Bedienungsanleitung  
Οδηγίες χρήσης  
Instrucciones de uso  
Kasutamishüend  
Käyttöohjeet  
Instructions d'utilisation  
Használati útmutató  
Istruzioni d'uso  
使用説明書  
Naudojimosi taisyklės  
Lietošanas pamācība  
Gebruiksaanwijzing  
Bruksanvisning  
Wskazówki do stosowania  
Instruções de utilização  
Instrucțiuni de utilizare  
Návod na použitie  
Navodila za uporabo  
Bruksanvisning  
Kullanım kılavuzu  
使用说明

Ambu A/S  
Bålforsbakkens 13  
Danmark  
DK-2750 Ballerup  
Tlf: +45 72 25 20 00  
Fak: +45 72 25 20 50  
www.ambu.com

492 7131 00 • V03 • 199/10

27019 0218



## Istruzioni per l'uso

### Elettrodo ad ago sottocutaneo a spirale monouso

#### Applicazione consigliata

Elettrodi per esami neurofisiologici e monitoraggio intraoperatorio.

#### Precauzioni

- Sterile se la confezione non è aperta o danneggiata. Non utilizzare qualora la confezione singola risulti danneggiata o sia stata aperta.
- Dispositivo monouso. Non riutilizzare o risterilizzare. La pulizia e la risterilizzazione del dispositivo possono compromettere la sicurezza, le prestazioni e l'efficacia dello stesso ed esporre pazienti e utenti a rischi non necessari.

#### Avvertenze

- Non collegare direttamente all'alimentazione.
- Da non utilizzare per alcun tipo di stimolazione né come elettrodi di terra.
- Uso riservato esclusivamente a personale addestrato ed esperto - USA: solo con ricetta medica.
- Durante le procedure che prevedono l'impiego dell'elettrochirurgia, prestare attenzione al rischio di interferenza accidentale con l'elettrodo; tale interferenza potrebbe provocare un riscaldamento accidentale dell'ago e danni al tessuto. Per evitare tale rischio, rimuovere gli elettrodi oppure posizionarli il più lontano possibile dall'area interessata dall'elettrochirurgia.

#### Specifiche

Ago:	0,60 mm (23 gauge), acciaio inossidabile
Conduttore:	1,2 m (47 pollici), PVC
Connettore:	Connettore DIN 42802
Metodo di sterilizzazione:	ossido di etilene
Condizioni di conservazione:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F

#### Istruzioni per l'uso

1. Aprire la confezione sterile e rimuovere l'elettrodo ad ago sottocutaneo a spirale monopaziente Ambu®.
2. Collegare il connettore dell'elettrodo ad ago al dispositivo di monitoraggio. Verificare che l'elettrodo sia collegato correttamente al dispositivo di monitoraggio.
3. Il posizionamento corretto degli elettrodi ad ago è definito solitamente dall'ospedale/dal medico e/o da protocolli/procedure locali.
4. Applicare l'elettrodo ponendolo a contatto con il cuoio capelluto e ruotare in senso orario, da mezzo giro a un giro completo.
5. Per rimuovere l'elettrodo, ruotarlo in senso antiorario.
6. Dopo l'uso, smaltire l'elettrodo ad ago in un contenitore apposito.